

UrgoTul Absorb Border opatrunek 15 cm x 20 cm, 1 sztuka



Cena: 38,10 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	Emplastri microfibricum cellulosae
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

UrgoTul Absorb Border opatrunek - 1 sztuka

Rozmiar: 15 x 20 cm

Opis produktu:

UrgoTul Absorb Border to **samoprzylepny, lipidowo-koloidowy, piankowy opatrunek z miękką, przylegającą TLC**. Ta innowacyjna technologia opracowana przez Laboratoires Urgo składa się z: miękkiej, przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz z silnie chłonną warstwą; przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej, cienkiej warstwy z silikonowym przyklepcem na brzegach, to szczególne połączenie zostało opatentowane.

Działanie:

- **UrgoTul Absorb Border zapewnia wszystkie korzyści warstwy TLC i silikonowych, samoprzylepnych brzegów** (wilgotne środowisko, optymalne wyniki gojenia, bezbolesne i bezurazowe zdejmowanie). TLC (Technologia lipidowo-koloidowa) to opatentowana, innowacyjna technologia obejmująca unikatowe skojarzenie polimerów i cząsteczek hydrokoloidu, zapewniająca bezbolesne i bezurazowe zdejmowanie opatrunku u pacjentów, przy jednoczesnym pobudzaniu gojenia.
- **Po zetknięciu z wysiękiem rany, cząstki te tworzą żel i stwarzają wilgotne środowisko, korzystne dla procesu gojenia**, co umożliwia prawidłowe działanie kluczowych komórek uczestniczących w procesie naprawy (fibroblastów, keratynocytów, makrofażów). W ten sposób UrgoTul Absorb Border zapewnia optymalne wyniki gojenia.
- **Skuteczność TLC wykazano w kilku badaniach klinicznych z udziałem ponad 36 000 pacjentów.**

- Chłonna wkładka z pianki poliuretanowej oraz silnie chłonna warstwa opatrunku UrgoTul Absorb Border odpowiadają za pochłanianie nadmiaru wysięku, zapobiegając maceracji. Opatrunek nadaje się do stosowania pod bandaż uciskowy, jeśli takie postępowanie zostało zlecane.
- Wodoodporne podłoże opatrunku UrgoTul Absorb Border jest miękkie, bardzo wygodne i nieokluzyjne, co umożliwia dobre dopasowanie opatrunku do ran o różnych kształtach oraz zapobiega przedostawaniu się płynu i bakterii przez opatrunek. Wysoka przepuszczalność dla gazów zapobiega maceracji tkanek, prowadząc do usunięcia nadmiaru wysięku.
- Opatrunek także rozciąga się w trakcie ruchów pacjenta, zapewniając wygodę. Silikonowy przylepiec zapewnia dobre przyleganie opatrunku, możliwość łatwej zmiany miejsca zastosowania opatrunku, a dodatkowo jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Samoprzylepny brzeg sprawia, że zbędne jest dodatkowe zabezpieczanie opatrunku.
- Opatrunek jest przezroczysty, dzięki czemu można kontrolować bezpośrednio ilość wysięku, co pozwala na zmianę opatrunku jedynie w razie potrzeby.

Zalety opatrunku:

- Optymalne efekty gojenia.
- Pochłanianie wysięku i drenaż rany, zapobiega maceracji.
- Utrzymuje wilgotne środowisko korzystne dla procesu gojenia rany.
- Bezurazowe i bezbolesne zdejmowanie.
- Wodoodporny, silikonowy, samoprzylepny brzeg.
- Bardzo wygodny; łatwa zmiana umiejscowienia opatrunku.

Sposób użycia:

Przygotowanie rany:

- Oczyszczyć ranę zgodnie z miejscowym protokołem.
- Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul Absorb Border.
- Ostrożnie osuszyć otaczającą skórę.

Nakładanie opatrunku:

- Zdjąć ochronne skrzydełka.
- Nałożyć na ranę miękką, przylegającą stroną opatrunku UrgoTul Absorb Border (samoprzylepny brzeg silikonowy powinien znajdować się co najmniej 1 cm od rany).
- Wygładzić opatrunek na ranie.
- Zabandażować opatrunek bandażem uciskowym, o ile zostało to zalecone.

Nakładanie odmiany krzyżowej opatrunku:

- Umieścić opatrunek tak, aby jego koniec był skierowany w stronę obszaru krzyżowego.

Zdejmowanie opatrunku:

- Ucisnąć zdrową skórę, unieść róg opatrunku i ostrożnie go odkleić.

Zmiana opatrunku Opatrunek UrgoTul Absorb Border można zmieniać co 2 do 4 dni, ale nie rzadziej niż co 7 dni w zależności od ilości wysięku i stanu rany.

Ostrzeżenia:

- Nie należy przecinać środkowej części opatrunku, która zawiera silnie chłonną warstwę. Natomiast w razie potrzeby można przyciąć samoprzylepne brzegi nożyczkami, tak aby opatrunek pasował do kształtu rany.
- W razie stwierdzenia objawów klinicznych miejscowego zakażenia, można zmienić opatrunek na opatrunek przeciwbakteryjny Urgo, w zależności od oceny klinicznej.
- Należy usunąć nadmierne owłosienie, obcinając włosy blisko skóry, aby zapewnić dobry kontakt opatrunku ze skórą.
- W przypadku równoczesnego stosowania opatrunku z kremem, emulsją, należy pozwolić na wyschnięcie skóry przed zastosowaniem opatrunku.
- Opatrunek UrgoTul Absorb Border nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej.
- Sterylne opakowanie jednostkowe do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna torebka ochronna nie została uszkodzona. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie sterylizować powtórnie opatrunku.

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławiać ponownie
- wyłącznie do użytku zewnętrznego

Ważne:

- Posiada oznakowanie **CE 0459**
- Posiada deklarację zgodności **UE**.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

