

## UrgoTul Absorb, lipidowo-koloidowy opatrunek z pianką, 10 cm x 10 cm, 1 sztuka



Cena: 13,95 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	Emplastri microfibricum cellulosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

### Wyrób medyczny

UrgoTul Absorb, opatrunek, 10 cm x 10 cm - 1 sztuka (z opakowania 10 sztuk).

Rozmiar: 10x10 cm

### Opis produktu:

- wyrób medyczny lipidowo-koloidowy opatrunek z pianką.

### Składa się :

miękkiej, przylegającej warstwy TLC wykonanej z polimerów i cząstek hydrokoloidu (karboksymetylocelulozy) połączonych z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej po zetknięciu się z raną, ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego.

### Wskazania:

UrgoTul Absorb jest wskazany we wszystkich

- przewlekłych ranach z wysiękiem (owrzodzeniach kończyn dolnych, odleżynach, owrzodzeniach stopy cukrzycowej),
- ostrych ranach (oparzeniach 2 stopnia, otarciach skóry, ranach pourazowych, ranach pooperacyjnych),
- w miejscowym leczeniu ran grzybiczych w skojarzeniu z leczeniem przeciwgrzybiczym.

Ze względu na brak właściwości samoprzylepnych, opatrunek UrgoTul Absorb jest zalecany w leczeniu ran, w których otaczająca skóra jest osłabiona

## Działanie:

Wyrób medyczny **UrgoTul Absorb**:

- Po zetknięciu się z wysiękiem z rany, cząstki hydrokoloidu z miękkiej, przylegającej warstwy TLC tworzą żel lipidowo-koloidowy.
- Stwarza wilgotne środowisko, które sprzyja gojeniu rany.
- Zapewnia bezurazowe zdejmowanie bez uszkodzania nowo powstałej tkanki ziarninowej.
- Umożliwia bezbolesne zmiany opatrunku.
- Chroni skórę wokół rany.
- Chłonna wkładka zawierająca piankę poliuretanową zapewnia drenaż wysięku, chroniąc skórę wokół rany przed maceracją.
- Podłoże jest miękkie, plastyczne i bardzo wygodne: umożliwia dobre dopasowanie opatrunku do kształtu rany.
- Miękki, przylegający opatrunek ułatwia pielęgnację rany, zapewniając łatwość stosowania i przestrzeganie przez pacjentów zaleceń dotyczących leczenia.

## Sposób użycia wyrobu medycznego:

1. Przygotowanie rany:

- Oczyszczyć ranę zgodnie z miejscowym protokołem, a następnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul Absorb.
- Ostrożnie osuszyć otaczającą skórę.

2. Nakładanie opatrunku:

- W razie potrzeby opatrunki UrgoTul Absorb można przyciąć jałowymi nożyczkami, dostosowując wielkość opatrunku do wielkości rany.
- Zdjąć ochronne skrzydełka.
- Nałożyć na ranę miękką, przylegającą stroną opatrunku UrgoTul Absorb.
- Zabezpieczyć opatrunek odpowiednim bandażem.
- Zabandażować opatrunek bandażem uciskowym, o ile zostało to zalecone.

### 3. Zmiana opatrunku:

- Opatrunki UrgoTul Absorb należy zmieniać co 2 do 4 dni w zależności od objętości wysięku i stanu klinicznego rany.
- O ile zalecono stosowanie opatrunków UrgoTul Absorb wraz z bandażem w żylnych owrzodzeniach kończyn dolnych, opatrunki można pozostawić na maksymalnie 7 dni w zależności od stanu rany i lokalnego protokołu.

## Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- W razie stwierdzenia objawów klinicznych miejscowego zakażenia, można zmienić opatrunek na opatrunek przeciwbakteryjny Urgo, w zależności od oceny klinicznej.
- Opatrunku UrgoTul Absorb Border nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej.
- Sterylne opakowanie jednostkowe do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna torebka ochronna nie została uszkodzona. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie sterylizować powtórnie opatrunku.
- Miękka, przylegająca warstwa TLC opatrunku UrgoTul Absorb przylega do rękawic chirurgicznych (lateksowych). Z tego powodu zaleca się unikanie kontaktu z miękką, przylegającą warstwą TLC.

## Ważne:

- Posiada oznakowanie **CE 0459**
- Posiada deklarację zgodności **UE**.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.