

## UrgoTul Absorb, opatrunek 15 cm x 20 cm, 1 sztuka



Cena: 38,10 PLN

### Opis słownikowy

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Producent / Marka | Urgo                               |
| Substancja czynna | Emplastri microfibricum cellulosae |
| Typ produktu      | Wyrób medyczny inny                |

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### UrgoTul Absorb opatrunek - 1 sztuka ( z opakowania 10 sztuk)

Rozmiar: 15 x 20 cm

### Opis produktu:

Piankowy opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z miękkiej, przylepnej warstwy TLC połączonej z miękką wkładką chłonną z przepuszczalnej dla gazów poliuretanowej pianki i cienkiej, wodoodpornej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach.

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością.

Wskazany do stosowania rany o większej powierzchni z umiarkowanym i dużym wysiękiem takie jak

- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych
- rany ostre: oparzenia, rany pooperacyjne, otarcia skóry, rany pourazowe

### Właściwości:

- wykazuje wysoki stopień chłonności, co zapobiega maceracji skóry,

- dzięki żelującej matrycy TLC utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko,
- warstwa TLC zapewnia optymalną rekonstrukcję skóry właściwej i naskórka,
- **pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku,**
- dobrze dopasowuje się do różnych kształtów rany,
- nie przywiera do rany, nie niszczy nowo powstałej tkanki,
- **łatwy i wygodny w aplikacji i używaniu,**
- chroni skórę wokół rany,
- nie wymaga wtórnego przytrzymania opatrunku, pozostaje na miejscu po nałożeniu,
- **wodoodporny.**

## Sposób użycia:

- W zależności od stopnia wysięku i stanu klinicznego rany, opatrunek należy zmieniać co 2-4 dni.
- W zależności od stanu rany, maksymalny czas przez jaki opatrunek może pozostać na ranie wynosi do 7 dni.
- Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej.
- Jeśli wcześniej użyto środka antyseptycznego, przed założeniem opatrunku, ranę należy ostrożnie przepłukać solą fizjologiczną.
- Zdjąć folię ochronną z opatrunku i miękką, przylegającą stroną przyłożyć go bezpośrednio na ranę.
- Samoprzylepny silikonowy brzeg powinien znajdować się min. 1 cm od rany.

## Ważne:

- Nie należy przecinać środkowej części opatrunku, która zawiera silnie chłonną warstwę. Natomiast w razie potrzeby można przyciąć samoprzylepne brzegi nożyczkami, tak aby opatrunek pasował do kształtu rany.
- W razie stwierdzenia objawów klinicznych miejscowego zakażenia, można zmienić opatrunek na opatrunek przeciwbakteryjny Urgo, w zależności od oceny klinicznej.
- Należy usunąć nadmierne owłosienie, obcinając włosy blisko skóry, aby zapewnić dobry kontakt opatrunku ze skórą.
- W przypadku równoczesnego stosowania opatrunku z kremem, emulsją, należy pozwolić na wyschnięcie skóry przed zastosowaniem opatrunku.
- Opatrunku UrgoTul Absorb Border nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej.
- Sterylne opakowanie jednostkowe do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna torebka ochronna nie została uszkodzona. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- **Nie sterylizować powtórnie opatrunku.**

## Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławiać ponownie
- wyłącznie do użytku zewnętrznego

## Podmiot odpowiedzialny:

Urgo Laboratoires 42 rue de Longvic, Francja Chenove

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.