

UrgoTul, opatrunek 10 cm x 12 cm, 1 sztuka



Cena: 16,46 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	Emplastru microfibrillum cellulosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

UrgoTul opatrunek - 1 sztuka

Rozmiar: 10 x 12 cm

Opis produktu:

- elastyczna lipidowo-koloidowa warstwa kontaktowa.
- nieokluzyjny, elastyczny i podatny opatrunek zawierający siateczkę poliestrową impregnowaną cząstkami hydrokoloidu dyspergowanymi w matrycy z wazeliny.

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością.

Skład:

UrgoTul zawiera hydrokoloid (karboksymetylocelulozę), olej parafinowy, wazelinę i polimery nośnikowe.

Wskazania:

Opatrunek **UrgoTul** jest wskazany do leczenia:

- **Ran ostrych** (oparzeń, ran pourazowych, otarć, ran pooperacyjnych),
- **Ran przewlekłych** (owrzodzeń kończyn dolnych, odleżyn i owrzodzeń stopy cukrzycowej) w stadium ziarninowania i epitelializacji.
- **Pęcherzowego złuszczenia naskórka** (EB).

Elastyczny i bardzo wygodny opatrunek UrgoTul jest szczególnie odpowiedni do stosowania na trudne do pokrycia lub nietypowo położone rany oraz do leczenia ran głębokich.

Właściwości:

- Stwarza i utrzymuje wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu rany,
- Jego usunięcie nie prowadzi do uszkodzenia nowo powstałej tkanki,
- Zmiana opatrunku jest bezbolesna.

Sposób użycia:

Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, dobrze przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku **UrgoTul**.

- Przygotować ranę zgodnie z miejscowym protokołem. Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, dobrze przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku **UrgoTul**.
- Zdjąć ochronną, przezroczystą, cienką folię.
- Nałożyć opatrunek **UrgoTul** na ranę w pojedynczej warstwie.
- Opatrunek **UrgoTul** można przyciąć jałowymi nożyczkami, dostosowując wielkość opatrunku do wielkości rany i otaczającej skóry.
- Przykryć opatrunek **UrgoTul** drugim opatrunkiem, odpowiednim do pochłonięcia wysięku z rany.
- Zabezpieczyć drugi opatrunek bandażem, przylepcem lub opaską elastyczną.
- Opatrunek **UrgoTul** należy zmieniać co 2 do 4 dni w zależności od typu rany i jej stanu klinicznego. Opatrunek **UrgoTul** można pozostawić na ranie przez maksymalnie 7 dni w zależności od stanu rany i protokołu (o ile zalecono jego stosowanie z bandażem uciskowym w leczeniu żylnych owrzodzeń kończyn dolnych).
- U pacjentów z pęcherzowym złuszczeniem naskórka opatrunek należy zmieniać co 1 do 3 dni.

Środki ostrożności:

- Opatrunek UrgoTul przywiera do rękawic chirurgicznych. Dlatego zaleca się zwilżenie rękawic chirurgicznych solą fizjologiczną, aby ułatwić posługiwanie się opatrunkiem UrgoTul.
- W razie stwierdzenia objawów klinicznych miejscowego zakażenia można zmienić opatrunek na opatrunek przeciwbakteryjny, w zależności od oceny klinicznej.
- W przypadku ran głębokich i ran przetoki należy pozostawić widoczną część opatrunku, co umożliwi jego usunięcie.

- Opatrunku UrgoTul nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej.
- Sterylne opakowanie jednostkowe do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna torebka ochronna nie została uszkodzona. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie sterylizować powtórnie opatrunku.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na opatrunek.

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławiać ponownie
- wyłącznie do użytku zewnętrznego

Ważne:

- Posiada oznakowanie **CE0459**
- Posiada deklarację zgodności **UE**.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.