

## Vacutest próżniowy zestaw do pobrania próbki moczu



Cena: 7,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	EL-COMP CEZARY KOSTUCH
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Vacutest, próżniowy zestaw sterylny do pobierania próbki moczu

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro jednorazowy.

### Skład:

Zestaw VACUTEST próżniowy do pobierania próbki moczu zawiera:

- sterylny pojemnik na moczu 120 ml,
- sterylną probówkę 9 ml,
- instrukcję użytkowania

### Wskazania:

- 

Zestaw umożliwia pobranie moczu do sterylnego pojemniczka, a następnie umieszczenie materiału drogą próżniową w probówce

-

Metoda próżniowa wypełnienia probówki zapewnia sterylność procesu i gwarantuje pełną wiarygodności badania

## Działanie:

- Pojemnik na mocz oraz probówka są idealnie dobrane.
- Po nabiciu probówki na igłę, umieszczoną w dedykowanym otworze w pojemniku, następuje samoczynne wypełnienie.
- Do laboratorium pacjent dostarcza tylko probówkę.

## Sposób użycia wyrobu medycznego:

- Ostrożnie. W celu uzyskania próbki do badania laboratoryjnego, przed użyciem należy dokładnie umyć ręce i części intymne.
- Założyć jednorazowe rękawiczki.
- Otworzyć wieczko odkręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Odłożyć wieczko górną powierzchnią do dołu na czystą powierzchnię.
- Nie dotykać wewnętrznej powierzchni pojemnika i wieczka.
- Pobrać próbkę moczu.
- Pojemnik powinien zostać napełniony do 3/4 pojemności.
- Szczelnie dokręcić wieczko w kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Delikatnie wstrząsnąć próbkę przed pobraniem jej do probówki.
- Częściowo unieść folię ochronną (nie zdejmować jej całkowicie). **WEWNĄTRZ ZNAJDUJĘ SIĘ IGŁA NIE WKŁADAĆ PALCA!**
- Włożyć probówkę.
- Delikatnie nacisnąć.
- Probówka musi pozostać zanurzona do momentu aż się napełni (ustanie przepływ)
- Wyjąć probówkę i ponownie dokładnie nakleić folię ochronną.
- Probówkę z pobranym mocze delikatnie potrząsnąć ok. 8-10 razy.
- Do laboratorium zanieść tylko probówkę.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
- Chronić od światła i wilgoci.
- Nie zamrażać.

- Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu zewnętrznym.

## Ważne:

- Wyrób medyczny jednorazowego użytku.
- Pojemnik należy stosować ze sterylną probówką próżniową.
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Producent:

EL-COMP Sp. z o.o. ul. Warszawska 11 82-300 Elbląg

## Dystrybutor:

El-Comp Cezary Kostuch ul. Warszawska 11 82-300 Elbląg