

Viola Test ciążowy super wczesny 2 testy



Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	CARE DIAGNOSTICA
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Viola Super wczesny test ciążowy paskowy 2 sztuki

Opis:

Super wczesny test ciążowy Viola® to czuły test domowego użytku do diagnostyki in vitro. Wyrób medyczny pozwala na wykrywanie ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, którego stężenie wzrasta w moczu kobiet kilka dni po zapłodnieniu. Test ciążowy Viola® austriackiej firmy Care Diagnostica jako jedyny na rynku polskim jest na tyle czuły, że **pozwała wykryć najmniejsze stężenie HCG (5 IU/litr moczu) odpowiadające już 8-dniowej ciąży**.

Szybki, jednoetapowy test immunochromatograficzny Viola® działa na zasadzie reakcji zachodzącej między hormonem hCG znajdującym się w moczu kobiety w ciąży z monoklonalnymi przeciwciałami anty-hCG, które zostały naniesione na test. W wyniku reakcji na teście pojawiają się barwne paski, które świadczą o podwyższonym stężeniu hormonu, a tym samym o rozwijającej się w organizmie kobiety wczesnej ciąży.

Viola® Super wczesny test ciążowy jest czuły i dokładny. Aby otrzymany wynik był wiarygodny, należy go wykonywać zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu. Test możesz wykonać o dowolnej porze dnia, ale zaleca się pobranie próbki moczu wczesnym rankiem ze względu na najwyższy poziom hCG.

Stosowanie:

Jak wykonać strumieniowy test ciąży Viola® Super?

- Otwórz kopertę foliową z testem tuż przed wykonaniem badania.
- Z kopertki wyciągnij test strumieniowy – pamiętaj, aby nie dotykać palcami paska absorpcyjnego.
- Trzymaj patyczek testowy w strumieniu moczu przez około 3 sekundy lub zanurz patyczek testowy na maksymalną głębokość w zebranym moczu na około 3 sekundy.
- Umieść patyczek testowy na opakowaniu foliowym i oceń wynik testu po dokładnie 5 minutach.

Interpretacja wyniku:

Wynik dodatni:

- Barwny prążek pojawia się zarówno w obszarze testowym T jak i w obszarze kontrolnym C.
- Pojawienie się 2 prążków oznacza ciążę i wymaga konsultacji lekarskiej.

Wynik ujemny:

- Barwny prążek widoczny jest tylko w obszarze kontrolnym C, natomiast nie pojawia się w obszarze testowym T.
- Oznacza to brak ciąży na 99,9%.
- W przypadku, gdy wynik testu jest ujemny, ale nie pojawia się spodziewana miesiączka, należy skonsultować się z lekarzem.

Wynik nieprawidłowy:

- Barwny prążek nie pojawia się w obszarze testowym T ani w obszarze kontrolnym C lub fioletowy prążek widoczny jest tylko w obszarze testowym T.
- Należy powtórzyć badanie z użyciem nowego testu.

Właściwości:

- super wczesny: wykrywa ciążę już w 8 dniu od zapłodnienia,
- do wykonania nawet przed terminem spodziewanej miesiączki,
- wynik w ciągu 5 minut,
- super czuły: 5 mIU/ml,
- dokładność na poziomie 99%.

Ważne:

- Produkt jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce in vitro.
- Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

- Wyrób medyczny przeznaczony jest do wstępnej diagnostyki w warunkach domowych i nie zastępuje porady lekarskiej.
- Prawidłowy i wiarygodny wynik testu ciążowego Viola® Super zależy w głównej mierze od właściwego i zgodnego z wytycznymi przeprowadzenia badania.
- Pozytywny wynik testu należy skonsultować z lekarzem, a wynik negatywny nie wyklucza w 100% ciąży.
- Nie używaj testu po upływie terminu ważności.
- Zamknięty test przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Po użyciu testu jego części składowe mogą zostać wyrzucone wraz z normalnymi odpadami domowymi.

Zawartość opakowania:

- 2 x opakowanie foliowe z testem w postaci patyczka i środkiem osuszającym,
- instrukcja użytkowania.

Producent:

Care Diagnostica Produktions - u. VertriebsgesmbH, Römerstraße 8, 2514 Traiskirchen, Austria

Dystrybutor:

Farmabol Sp. z o.o., ul. T. Ociepki 4, 34-600 Limanowa

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.