

VITAM Test ciążowy Płytkowy 10mIU/ml 1 szt.



Cena: 3,49 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	DIAGNOSIS S.A.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Vitam Test ciążowy płytkowy - 1 sztuka

WYRÓB DO SAMOKONTROLI

Opis produktu:

Vitam Test ciążowy płytkowy to szybki i łatwy test do domowego użytku.

Wyniki testu pojawiają się w ciągu 3-5 minut. Test ciążowy płytkowy Vitam jest niezwykle prosty do samodzielnego wykonania a przy tym czuły - wykrywa hCG przy stężeniu 25 mIU/ml.

Gonadotropina kosmówkowa (hCG) to hormon wytwarzany przez rozwijające się łożysko wkrótce po zapłodnieniu i pojawia się w moczu już we wczesnej fazie ciąży. **Test zawiera przeciwciała, które w swoisty sposób reagują z tym hormonem.** W momencie zakroplenia próbki moczu na płytkę testową, działanie kapilarne powoduje przemieszczenie próbki przez membranę. **Wiarygodność testu wynosi 99%.** Test jest w stanie wykryć już 6-dniową ciążę i może być stosowany o każdej porze dnia.

Zawartość opakowania:

- opakowanie foliowe, wewnątrz którego znajduje się test płytkowy oraz pochłaniacz wilgoci, instrukcja użycia

Stosowanie:

- Celem przeprowadzenia badania wyjmij test z foliowego opakowania rozrywając miejsce zgrzewu.
- Wypakuj pipetę oraz test ciążowy, który należy położyć na płaskiej poziomej powierzchni.
- Zanurz końcówkę pipety w pojemniku z próbką moczu.
- Ściskając szeroką część pipety nabierz próbkę moczu.
- Trzymając pipetę z próbką moczu pionowo nad okienkiem na próbkę moczu umieść w nim dokładnie 4 krople moczu.
- Wynik pozytywny pojawi się już po 1 minucie.
- Aby potwierdzić wynik negatywny należy odczekać 3 minuty.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Producent:

Diagnosis S.A., ul. Gen. Andersa 38A, Białystok

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.