

## Vizik Alergia, krople do oczu, 10 ml



Cena: 32,99 PLN

### Opis słownikowy

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Producent / Marka | Natur produkt            |
| Substancja czynna | -                        |
| Typ produktu      | Wyrób medyczny leczniczy |

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Vizik Alergia krople do oczu - 10 ml

#### Właściwości:

- Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w przypadku zaczerwienionych, suchych i swędzących oczu.
- Sterylne krople do oczu chronią przed alergenami, łagodzą podrażnienie i swędzenie oczu.
- Nawilżają oczy tworząc skuteczną barierę chroniącą przed szkodliwymi czynnikami takimi jak alergeny.
- Dzięki zawartym składnikom zapewniają długotrwałą ulgę oraz wspomagają proces regeneracji podrażnionej i wrażliwej spojówki.
- Nie zawierają konserwantów, dlatego są bardzo dobrze tolerowane nawet przy dłuższym stosowaniu.
- Mogą być stosowane 12 miesięcy po otwarciu.

#### Skład:

- 1 ml zawiera: hialuronian sodu 0,15%, ektoinę 2%, chlorek sodu, cytrynian sodu, kwas cytrynowy, wodę do wstrzykiwań

## Sposób użycia:

- W celu otwarcia butelki z kroplami należy zdjąć pierścień zabezpieczający, pociągając za jego wystającą część, do całkowitego usunięcia. Następnie zdjąć korek pociągając do góry. Odchylić nieco głowę do tyłu, spojrzeć w górę i delikatnie odciągnąć dolną powiekę oka.
- Trzymając butelkę otworem skierowanym do dołu, zakraplać 1 kroplę do worka spojówkowego 3-5 razy dziennie, poprzez mocne, dłuższe naciśnięcie. Powoli zamknąć oczy, aby umożliwić równomierne rozprowadzenie płynu na powierzchni oka.
- Aby zachować sterylność preparatu należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z oczami lub dłońmi. Pozostającą na otworze kroplę należy usunąć przez lekkie stuknięcie w dno jeszcze przechylonej butelki. Zamknąć butelkę, lekko przyciskając nakrętkę do otworu.

## Ważne informacje:

- Nie dotykać do oczu kroplomierzem.
- Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników preparatu.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Ważne:

- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE 0483
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

**Producent: Penta Arzneimittel GmbH**