

Vizik Podrażnione, zaczerwienione oczy, krople do oczu, 10 ml



Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Vizik Podrażnione, zaczerwienione oczy, krople do oczu, 10 ml

- Sterylne krople do oczu Vizik na podrażnione i zaczerwienione oczy mogą być stosowane na przemęczone oczy, a zawarte w nich składniki zmniejszają zaczerwienienie oczu, szybko i na długo łagodząc objawy.
- Jedyne krople do oczu, które mogą być używane nawet 12 miesięcy po otwarciu.
- Krople Vizik nie zawierają konserwantów, są bardzo dobrze tolerowane nawet przy dłuższym stosowaniu.
- Krople do oczu Vizik mogą być stosowane także przez osoby noszące soczewki kontaktowe.

Zastosowanie:

- Chronią i pielęgnują i przynoszą ulgę zmęczonym oczom

Sposób użycia:

- W celu otwarcia butelki z kroplami należy zdjąć pierścień zabezpieczający, pociągając za jego wystającą część, do całkowitego usunięcia.
- Następnie zdjąć korek pociągając do góry.
- Odchylić nieco głowę do tyłu, spojrzeć w górę i delikatnie odciągnąć dolną powiekę oka.
- Trzymając butelkę otworem skierowanym do dołu, zakraplać 1 kroplę do worka spojówkowego 3-5 razy dziennie, poprzez mocne, dłuższe naciśnięcie.
- Powoli zamknąć oczy, aby umożliwić równomierne rozprowadzenie płynu na powierzchni oka.
- Aby zachować sterylność preparatu należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z oczami lub dłońmi.
- Pozostającą na otworze kroplę należy usunąć przez lekkie stuknięcie w dno jeszcze przechylonej butelki. Zamknąć butelkę, lekko przyciskając nakrętkę do otworu.

Skład:

- Dekspantenol, karbomer, bezwodny kwas cytrynowy, sorbitol, woda wysokooczyszczona.

Uwaga:

- Nie używać preparatu z przypadku pęknięcia pierścienia zabezpieczającego nakrętkę lub uszkodzenia butelki.
- Nie dotykać do oczu kroplomierzem.
- Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników, w przypadku infekcji lub uszkodzenia rogówki.
- Jeśli stosujesz inne krople/maści do oczu, odczekaj około 15 minut.
- Po aplikacji może wystąpić chwilowe rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie.
- W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn będących w ruchu.
- Nie należy używać po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu
- Należy zużyć w ciągu 12 miesięcy po pierwszym użyciu

Informacje dodatkowe:

- Jeżeli nie nastąpiła poprawa lub nastąpiło pogorszenie objawów, należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem. (OSD) –
- Specjalny system sterylnych filtrów kroplomierza wymaga, aby każdorazowo po zakropleniu oka odczekać kilka sekund nie naciskając na butelkę, celem uniemożliwienia powrotu powietrza do jej wnętrza.
- Niewykonanie tej czynności może spowodować, że dalsze aplikacje kropli będą utrudnione, czyli konieczne będzie stosowanie coraz mocniejszego ucisku butelki w celu odmierzenia kolejnych kropli.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada certyfikat CE 0483
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze od 2 do 25°C
- Chronić przed mrozem
- Po użyciu każdorazowo zamknąć butelkę nakrętką
- Chronić przed światłem, przechowując butelkę w w oryginalnym opakowaniu
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci

Producent:

Penta Arzneimittel GmbH, Werksstrasse 3, 92551 Stulln, Niemcy.

Dystrybutor:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.

Producent: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
Adres: ul. Nocznickiego 31 01-918 Warszawa
E-mail: reklamacje@zdrovit.pl