

## Wartix krioterapia 38 ml



Cena: 39,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Genexo
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

**Wartix** preparat do wymrażania brodawek, to produkt kriochirurgiczny do leczenia brodawek zwykłych (kurzajki na rękach) i podeszwowych (kurzajki na stopach) oraz brodawek mięczaka zakaźnego (*Molluscum Contagiosum*). Można je usuwać metodą wymrażania (krioterapii). Produkt to wyrób medyczny dostępny bez recepty.

Krioterapia natychmiast zamraża brodawkę podczas aplikacji. Proces zamrażania może powodować przejściowe zaczerwienienie skóry lub powstanie pęcherza na powierzchni brodawki. Pojedyncze zastosowanie Wartix produktu do wymrażania brodawek wystarczy do usunięcia brodawki.

## Właściwości:

- Efekty widoczne w ciągu minimum 10-14 dni
- Skuteczna metoda usuwania brodawek, ponieważ aplikator obejmuje brodawkę i zamraża ją do rdzenia
- Bezpieczny, dzięki zastosowaniu przezroczystej głowicy aplikatora o unikalnym kształcie, tworzącej "zamkniętą komorę" oraz systemowi precyzyjnego dozowania
- Łatwy w użyciu, nie wymaga montażu przed zastosowaniem

## W zestawie:

- 1 dozownik o pojemności 38ml z trwale zamocowanym aplikatorem; zawiera eter dimetylowy (DME)
- 1 instrukcję użycia

## Ostrzeżenia

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat
- Nie stosować u osób chorujących na cukrzycę
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego
- Skrajnie palny aerozol
- Dozownik pod ciśnieniem
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu
- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie CE 0344
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

## Producent:

Koninklijke Utermohlen N.V. De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega, Holandia

## Dystrybutor:

Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajęczka 26, 01-510 Warszawa