

Windi, kateter rektalny dla niemowląt, Frida Baby, 10 szt.



Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka SKANDPROJEKT S.C.

Substancja
czynna -

Typ produktu Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Frida Baby Windi, kateter rektalny dla niemowląt, 10 szt.

Kateter rektalny firmy Frida to produkt w postaci rurki doodbytniczej dla niemowląt, której zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru gazów w sposób bezpieczny i naturalny. Pomaga przynieść ulgę dziecku zmniejszając wzdęty brzusek.

Kiedy zastosować:

Doodbytniczo, celem usunięcia zalegających gazów z układu pokarmowego niemowląt

Wskazania do stosowania:

Produkt do stosowania u niemowląt i małych dzieci przy wzdęciach i kolkach.

Charakterystyka produktu:

Kateter rektalny Windi to szwedzki wyrób medyczny dedykowany do usuwania nadmiaru gazów z układu pokarmowego dzieci już od 1. dnia życia. Preparat, używany według instrukcji jest bezpieczny i nie podrażnia śluzówki odbytu. Stosowanie kateteru pozwala uniknąć potrzeby użycia preparatów farmakologicznych.

Produkt nie zawiera BPA.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

Preparat należy stosować zawsze według instrukcji użycia.

- Delikatnie rozmasować, ruchami kolistymi, brzuch niemowlęcia kierując się ku dołowi.
- Nasmarować końcówkę Windi olejem kokosowym lub innym bezpiecznym dla użytku wewnętrznego dziecka produktem nadającym poślizg.
- Unieść stopy dziecka i przygotować pieluchę.
- Ostrożnie włożyć kateter do odbytu (w sposób identyczny jak termometr doodbytniczy). Odczekać chwilę, do momentu usłyszenia gwizdka. Jeśli brak jest sygnału, należy ponownie rozmasować brzuch dziecka i powtórzyć wcześniejsze czynności.
- Po zastosowaniu, wyrzucić kateter.

Zawartość opakowania:

Opakowanie zawiera 10 sztuk katetrów.

Uwagi przy stosowaniu wyrobu medycznego:

- Nie zostawiać preparatu w odbycie dziecka.
- Po każdorazowym zabiegu rurkę Windi należy wyrzucić. Ponowne użycie tego samego przyrządu może stanowić ryzyko infekcji.
- Nie używać wyrobu częściej niż trzy razy na dobę.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Producent: Frida

</html>