

Zatoxin Rinse, Zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator

Cena: 26,10 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Tactica
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Zatoxin Rinse Zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator

DLA DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA I DOROSŁYCH

Kompletny zestaw do płukania nosa i zatok. Oczyszcza nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów.

Skład:

- chlorek sodu, dwuwęglan sodu

Wskazania:

- W stanach zapalnych zatok przynosowych,
- W nieżytach nosa różnego pochodzenia,
- Przed i po zabiegach chirurgicznych.
- Profilaktycznie w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Działanie:

- pozwala na dokładne oczyszczenie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów, tym samym ograniczając gromadzenie się czynników, które mogą powodować infekcję.
- nawilża suchą i podrażnioną błonę śluzową nosa i zatok.
- unikalna konstrukcja irygatora umożliwia płukanie nosa i zatok w łatwy i kontrolowany sposób - bez użycia dodatkowej siły i bez konieczności ściskania butelki

Dawkowanie:

W przypadku zapalenia zatok przynosowych, w nieżycie nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok oraz profilaktycznie, w celu zachowania higieny nosa i zatok:

- rozpuścić 1 saszetkę w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować izotoniczny roztwór do irygacji

w przypadku silnych objawów takich jak np. uciążliwe uczucie zatkanego nosa:

- rozpuścić 2 saszetki w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować hipertoniczny roztwór do irygacji
- Płukanie nosa przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza, profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją użycia, która zawiera istotne informacje dotyczące sposobu i warunków jego stosowania
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu
- Całkowita blokada nosa uniemożliwiająca wydostanie się roztworu
- Nie stosować u osób, u których występuje poważne krwawienie z nosa
- Nie należy stosować wyrobu w przypadku otwartych ran w obrębie nosa, zwłaszcza nie zagojonych ran po zabiegach chirurgicznych.
- Nie stosować u osób z zaburzeniami równowagi.

Zawartość opakowania:

- Butelka do irygacji (max pojemność 300 ml) - 1 szt.
- Saszetki w kartoniku z proszkiem do przygotowania roztworu - 12 szt.
- Końcówki do irygacji klasycznej i łagodnej - 2 szt.
- Instrukcja używania - 1 szt.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada certyfikat CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Zawartość pojemnika jednodawkowego należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.
- Wszelkie pozostałości produktu nie mogą być używane, ponieważ wyrób nie zawiera konserwantów, a pozostałości produktu mogą ulec zanieczyszczeniu, tym samym narażając oko na ryzyko zakażenia.

Przechowywanie:

- Chronić przed mrozem i światłem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość netto: 38,4 g

Producent/Dystrybutor:

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 148A/1A, 30-212 Kraków.