

Zatoxin Rinse zestaw do płukania zatok

Cena: 24,95 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Tactica
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Zatoxin Rinse Zestaw do płukania nosa i zatok - 12 saszetek + irygator

DLA DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA I DOROSŁYCH

Opis produktu:

Kompletny zestaw do płukania nosa i zatok. Oczyszcza nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów

Skład:

- chlorek sodu, dwuwęglan sodu

Działanie:

- pozwala na dokładne oczyszczenie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów, tym samym ograniczając gromadzenie się czynników, które mogą powodować infekcję.
- nawilża suchą i podrażnioną błonę śluzową nosa i zatok.
- unikalna konstrukcja irygatora umożliwia płukanie nosa i zatok w łatwy i kontrolowany sposób - bez użycia dodatkowej siły i bez konieczności ściskania butelki

Dawkowanie:

W przypadku zapalenia zatok przynosowych, w nieżyście nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok oraz profilaktycznie, w celu zachowania higieny nosa i zatok:

- rozpuścić 1 saszetkę w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować izotoniczny roztwór do irygacji

w przypadku silnych objawów takich jak np. uciążliwe uczucie zatkanego nosa:

- rozpuścić 2 saszetki w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować hipertoniczny roztwór do irygacji
- Płukanie nosa przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza, profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją użycia, która zawiera istotne informacje dotyczące sposobu i warunków jego stosowania
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
- Całkowita blokada nosa uniemożliwiająca wydostanie się roztworu
- Nie stosować u osób, u których występuje poważne krwawienie z nosa
- Nie należy stosować wyrobu w przypadku otwartych ran w obrębie nosa, zwłaszcza nie zagojonych ran po zabiegach chirurgicznych.
- Nie stosować u osób z zaburzeniami równowagi

Zawartość opakowania:

- Butelka do irygacji (max pojemność 300 ml) - 1 szt.
- Saszetki w kartoniku z proszkiem do przygotowania roztworu - 12 szt.
- Końcówki do irygacji klasycznej i łagodnej - 2 szt.
- Instrukcja użytkownika - 1 szt.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ważne:

- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.