

## Zatoxin Rinse, zestaw uzupełniający, 30 saszetek

Cena: 19,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Tactica
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy



### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Zatoxin Rinse zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok - 30 saszetek

DLA DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 4 ROKU ŻYCIA

### Wskazania:

- Zapalenie zatok przynosowych.
- Nieżyt nosa różnego pochodzenia.
- Przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok.
- Profilaktycznie, w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

### Działanie:

- Zatoxin Rinse pozwala na **dokładne oczyszczenie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów**, tym samym **ograniczając gromadzenie się czynników, które mogą powodować infekcję**.

- Dodatkowo nawilża suchą i podrażnioną błonę śluzową nosa i zatok.

## Stosowanie:

- W przypadku zapalenia zatok przynosowych, w nieżycie nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok oraz profilaktycznie, w celu zachowania higieny nosa i zatok: rozpuścić 1 saszetkę w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować izotoniczny roztwór do irygacji.
- W przypadku silnych objawów takich jak np. uciążliwe uczucie zatkanego nosa: rozpuścić 2 saszetki w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować hipertoniczny roztwór do irygacji.

Płukanie nosa przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza, profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu.

## Skład:

Chlorek sodu, dwuwęglan sodu.

## Ważne:

- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją użycia, która zawiera istotne informacje dotyczące sposobu i warunków jego stosowania.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Całkowita blokada nosa uniemożliwiająca wydostanie się roztworu.
- Nie stosować u osób, u których występuje poważne krwawienie z nosa.
- Nie należy stosować wyrobu w przypadku otwartych ran w obrębie nosa, zwłaszcza nie zagojonych ran po zabiegach chirurgicznych.
- Nie stosować u osób z zaburzeniami równowagi.
- Zestaw jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

## Podmiot odpowiedzialny:

TACTICA

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.