

Zetuvit Plus, opatrunek, 10x20cm, owrzodzenia, odleżyny, 1 sztuka



Cena: 26,48 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Emplastru microfibrillum cellulosae
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Zetuvit Plus kompres jałowy 10 x 20 cm -

1 sztuka

Rozmiar: 10x20 cm

Opis:

- Wyrób medyczny **Zetuvit Plus** to wysoce **chłonny, czterowarstwowy opatrunek** o wymiarach 10 x 20 cm. Przeznaczony jest do ran z dużym wysiękiem.

Skład:

- Dwie zewnętrzne warstwy wykonane zostały z włókniny, natomiast warstwy zewnętrzne wytworzono z hydrofilowych włókien celulozowych.

Zawartość opakowania:

1 opatrunek o wymiarach 10 x 20 cm.

Działanie:

- Opatrunek **Zetuvit Plus** wykazuje się dużymi właściwościami chłonnymi dzięki hydrofilowej pulpie celulozowej, która pochłania wysięk i zawarte w nim enzymy, bakterie proteolityczne, a także martwicę rozpuszczalną.
- Dzięki szybkiemu odprowadzeniu wysięku kontakt rany z czynnikami spowalniającymi leczenie jest ograniczony i krótkotrwały, co zapobiega maceracji skóry i wspiera szybsze gojenie się.
- Miękość warstwy chłonnej dodatkowo wykazuje właściwości wyścielające ranę.
- Hydrofobowa warstwa zewnętrzna zapobiega przeklejaniu się opatrunku i równomiernie rozprowadza wysięk po całej jego powierzchni.
- Strona przeciwna do rany wyposażona jest we włókninę przepuszczającą powietrze, jednak szczelną dla płynów, dzięki czemu wydzielina nie wydostaje się poza opatrunek.

Wskazania:

- Produkt wskazany jest do stosowania na rany powierzchniowe, silnie sączące się, zarówno ostre, jak i przewlekłe np. odleżyny, owrzodzenia podudzi, owrzodzenia nowotworowe.
- W przypadku ran zainfekowanych opatrunek można stosować w kombinacji z opatrunkami o działaniu przeciwbakteryjnym.

Charakterystyka produktu:

- Produkt jałowy, jednorazowego użytku.

Stosowanie produktu:

1. Dobierz odpowiedni rozmiar opatrunku, tak aby zakrywał całą ranę i około 1-2 cm zdrowej skóry wokół niej.
2. Przyłóż opatrunek białą stroną do rany. Zielona warstwa powinna znajdować się po zewnętrznej stronie.
3. Zabezpiecz opatrunek przylepcem, opaską lub opaską uciskową. Można go stosować również z kompresjoterapią.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Nie przycinać opatrunku.
- Produkt jednorazowego użytku.
- Nie używać jeśli opakowanie indywidualne jest uszkodzone lub otwarte.

Ważne:

- Posiada oznakowanie **CE 0123**
- Posiada deklarację zgodności **UE**.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.

- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.