

Zuma, Świetlik Plus łagodzące krople do oczu, 2 x 10 ml



Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Suprobion
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Zuma Świetlik Plus, łagodzące krople do oczu roztwór - 2 x 10 ml

Opis produktu:

Krople Zuma Świetlik Plus zawierają **wyciąg z rumianku, świetlika, bławatka i oczaru**, dzięki czemu łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia oczu spowodowane działaniem czynników zewnętrznych.

Składniki:

Wyciąg z rumianku, ze świetlika, wyciąg z bławatka, wyciąg z oczaru wirginijskiego, chlorek sodu, fosforan dwusodu, dwufosforan sodu, wersenian czterosodu, cetrymid, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

Właściwości:

ZUMA Świetlik plus są kroplami do oczu, które dzięki odświeżającym i kojącym właściwościom rumianku, świetlika, bławatka i oczaru łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia oczu spowodowane zbyt długą pracą przy komputerze, wysiłkiem sportowym, działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, kurz, zwiększone nasłonecznienie.

Sposób użycia:

1. Krople do oczu ZUMA Świetlik plus należy stosować tylko zewnętrznie, miejscowo do worka spojówkowego.
2. Przed zakropleniem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakropić preparat do oka. Jeżeli kropla nie dotarła do oka, należy wkropić następną. Delikatnie zamrużyć okiem. Zamknąć butelkę.
3. Po zakropleniu kropli, nie zakraplać/ płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.
4. Zakraplać 1 krople do oka. Zakraplanie można w ciągu dnia powtarzać w zależności od potrzeb.

Ważne:

- Zawiera środek konserwujący: cetrymid.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.

Ważne:

- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE 0051
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Opakowanie: 2 x 10 ml.

Dystrybutor: S-LAB Sp. z o.o., ul. Kiełczowska 2, 55-095 Mirków